

感谢您搭乘本公司航班。
 使用该氧气瓶时,请务必在出发前阅读下述使用方法,
 在医生或护士的指导下谨慎操作设备。
 机场工作人员、客舱乘务员无法提供关于产品使用方法或操作方法说明等服务,敬请知悉。

氧气瓶的使用方法【国际航线】

<p>各部分名称</p> <p>流量调节器 </p> <p>主旋塞 </p>  <p>面罩/插管安装部 </p>	<p>附属品</p> <p>面罩 </p> <p>插管 </p>	<p>注意 严禁触碰黑色手柄。 可能会导致氧气泄露。</p> 
<p>使用前</p>	<p>①将面罩或插管安装至流量调节器上。</p>  <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>注意 请勿改变安装部的方向。</p> </div>	<p>②确认流量调节器的刻度是否为“0”。</p> 
<p>使用中</p>	<p>③将主旋塞逆时针旋转1/4。</p> 	<p>④将流量调节器上的刻度调整为医生建议的流量刻度。</p> 
<p>使用后</p>	<p>①顺时针旋转主旋塞并将其牢牢紧固。</p> 	<p>②将流量调节器上的刻度调整为“0”。</p> 

※请将氧气瓶平放在您前方的座椅下方。
 如前方没有座位,请在飞机起飞及降落时将其放于腿上。