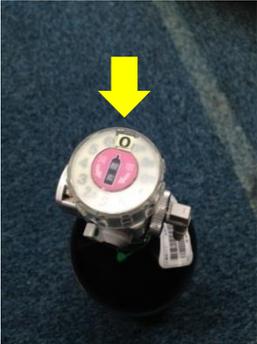


Gracias por embarcarse.

Para su información, el personal del aeropuerto y la tripulación de cabina no pueden operar un cilindro de oxígeno ni explicar su funcionamiento.

Instrucciones para cilindros de oxígeno【Nacional】

Funciones	Adjuntos
	 <p>Máscara Cánula</p>
<p>Cómo utilizar</p> <p>① Instale una máscara o una cánula en la salida de oxígeno.</p> 	<p>② Verifique que el selector del regulador de flujo esté en "0".</p> 
<p>③ Gire la válvula de cierre para abrirla (verde) completamente.</p> 	<p>④ Establezca el flujo de oxígeno de acuerdo con las instrucciones de su médico girando el selector.</p> 
<p>Método de cierre</p> <p>① Gire la válvula de cierre para cerrarla (rojo) completamente.</p> 	<p>② Establezca la escala del regulador de flujo en "0".</p> 

✘ Coloque el cilindro debajo del asiento delantero.

Si no cabe, manténgalo en el regazo durante el despegue y el aterrizaje.